

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Till Journalias kunder som använder Journalias AK (antikoagulantia)

Gäller alla versioner.

Risk för inaktuellt meddelande på doseringsbrev

Denna risk uppstår när en behandling startats upp på nytt, alternativ 3 vid omstart, samtidigt som den tidigare avslutade behandlingens sista dosering innehöll ett meddelande och slutligen att det sker en manuell registrering av datum för ny ordination.

Åtgärd som användaren bör vidta för att undvika risk

I samband med att behandling startats upp på nytt ska användaren gå igenom alla steg för att få ett datum automatiskt under senaste ordination efter frågan: Införa nytt provvärde och dosera? Alternativt: Införa ny kontroll?

Kontrollera aktivt meddelande och ev ändra/radera det efter omstart av behandling.

Säkerhetshöjande åtgärd i programmet

Rättelse så att ett meddelande från tidigare behandlingsomgång inte kommer med om man begärt ny behandling utan gamla doser.

Ny release levereras i mars 2019 till respektive kunds acceptans-/test-miljö. Införande i respektive kunds produktions-/drifts-miljö i samråd med respektive kund.

Sprid denna information till alla berörda inom organisationen!

Rapportering är gjord till Läkemedelsverket.