

Viktigt säkerhetsmeddelande

Vårdrumspanel Aluflex

Dokumentets ID : 1-1/2018

Typ av åtgärd : Korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden

Datum: 2018-12-04

Uppgifter om berörda produkter:

Projekt: [REDACTED]

Order nr.: [REDACTED]

Serie nr.: Se tabell

Beskrivning av problemet:

Läckage i QMT gasuttag MK2

Ett toleransproblem har identifierats som berör QMT's gasuttag av modellen MK 2. Problemet har medfört att vårdrumspaneler som testats av oss på Fagerhults Belysning AB och funnits täta kan efter en tids användande börja läcka. Problemet beror på att en intern O-ring i gasuttaget kan flytta sig och hamna i ett felaktigt läge.

QMT kommer att åtgärda samtliga gasuttag genom att dom kommer ut på plats och byter ut en kägla med O-ring i gasuttagen.

Åtgärder som kan vidtagas:

Om ett läckage uppstår kan vi bara råda nyttjaren att stänga av gasdistributionen för läckande media. Om vårdrumspanelen är i drift med patienter måste reserv gas på flaska nyttjas.

Följande säkerhetsmeddelande bör kommuniceras:

Var vänlig och vidarebefordras till berörd personal inom avdelningar om ovanstående produkter är i bruk.

Kontaktperson:

Fagerhult Belysning AB

Lars Handberg

566 80 Habo

Sverige

Vi ber om ursäkt för de problem som ovanstående fel har förorsakat Er. Vi kommer under den närmsta tiden återkomma med besked när åtgärder kan utföras på plats och hoppas att detta inte ska medföra allt för stor inverkan på er verksamhet. Dessa åtgärder kommer att ske i samspråk med respektive avdelning för att minimera störningar i verksamheten.



Lars Handberg

Technical Product Manager

Tabell levererade vådrumspaneler:

Typ nr	Serie nr.	Antal gasuttag
1	9037672.1	4st gasuttag
1	9037672.2	4st gasuttag
1	9037672.3	4st gasuttag
3	9037673.1	4st gasuttag
3	9037673.2	4st gasuttag
3	9037673.3	4st gasuttag
3	9037673.4	4st gasuttag
3	9037673.5	4st gasuttag
3	9037673.6	4st gasuttag
3	9037673.7	4st gasuttag
3	9037673.8	4st gasuttag
3	9037673.9	4st gasuttag
3	9037673.10	4st gasuttag
3	9037673.11	4st gasuttag
3	9037673.12	4st gasuttag
3	9037673.13	4st gasuttag
3	9037673.14	4st gasuttag
3	9037673.15	4st gasuttag
3	9037673.16	4st gasuttag
3	9037673.17	4st gasuttag
3	9037673.18	4st gasuttag
3	9037673.19	4st gasuttag