

Service Information Letter

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Till alla användare av EMS-båren P/N 1354100 Rev.NC – Rev.F.
Detta Service Information Letter (serviceinformationsmeddelande) måste överlämnas till alla som berörs av denna information inom din organisation.

Ämne: Information om hur ryggstödet på EMS-båren ska användas

FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION (FSCA)

FSCA Reference Number: 00927/19


Tillämplighet: EMS STRETCHER P/N 1354100 Revision NC – Revision F

Referensdokument: Bruksanvisning: S4453_GBA_E035-01-13_ENG_Rev04

Syfte: Att se till att EMS-bårarna används på ett korrekt och säkert sätt.

Bakgrund: Vi har fått rapporter om incidenter där ryggstödet på EMS-båren har kollapsat vid användning på marken. För att undvika liknande incidenter i framtiden måste följande steg utföras:

3. Dra det röda handtaget under huvudändan på båren mot dig och lyft eller sänk ryggstödet till önskad position.

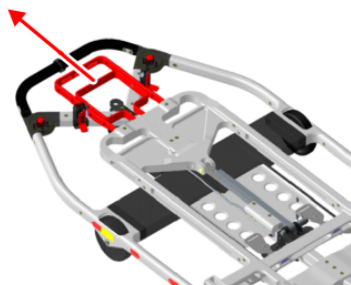

4453_FP_1354100_Operation08_Rev01

4. Släpp handtaget och lyft eller sänk ryggstödet lätt tills det hakas fast.

5. Kontrollera att ryggstödet är ordentligt fasthakat genom att lyfta och sänka det en aning efter att handtaget släppts.



Bucher Leichtbau AG
Industriestrasse 1A
CH-8117 Fällanden
Switzerland

CAGE: S4453
Phone: +41 44 806 2424
Fax: +41 44 806 2410

Service Information Letter

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Åtgärd: *De ovan angivna anvisningarna måste följas. Detta Service Information Letter ska kvitteras med det aktuella rapportbladet.*

Bucher Leichtbau AG kommer offentliggöra en servicebulletin under våren 2019. Denna servicebulletin innehåller en förbättrad låsmekanism samt en optisk indikeringsbult som visar när ryggstödet är fasthakat på ett korrekt sätt. Dessa delar tillhandahålls av Bucher Leichtbau och ska monteras på bären. Därefter måste man kvittera att dessa delar monterats.

Observera: Översättningen till svenska har gjorts i enlighet med MEDDEV 2.12-1 rev8. För luftfartstillståndet gäller endast den engelska versionen.

Kontakta vår kundtjänst för mer information och beställning av de aktuella servicebulletinerna.

Att.: Mr. Heinrich Burkhard
E-post: hburkhard@bucher-group.com
Tel.: +41 44 806 24 44

Med vänlig hälsning

Philipp Affentranger (Project Leader Engineering)

Alen Salihovic (Head of Product Design)

Dominik Schläpfer (Chief of Office of Airworthiness)

112
BU/DO

Bucher Leichtbau AG
Fällanden

Date: Mar 06/2019
Revision: 00, Mar 06/2019

SIL Number: S4453-25-008
Page: 2 of 3



Bucher Leichtbau AG
Industriestrasse 1A
CH-8117 Fällanden
Switzerland

CAGE: S4453
Phone: +41 44 806 2424
Fax: +41 44 806 2410

Service Information Letter **Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden**

RAPPORTBLAD

Bekräfta att du har tagit emot och förstått innehållet i detta brev. Underteckna rapportbladet och skicka en skannad kopia via e-post till:

Heinrich Burkhard – Customer Service

E-post: hburkhard@bucher-group.com

Ort, datum:

Underskrift:
